

SISTEMA DE DESINFECCIÓN

Limpeza para lentes de contacto blandas

cleadew

ADVANCED CARE SYSTEM

Desinfectante: Povidona-yodada

Neutralizador: Ácido ascórbico

Limpeza: Enzima proteolítico, surfactante

Fuerte eficacia desinfectante gracias a la povidona yodada

La povidona yodada es un desinfectante antibacteriano de amplio espectro que presenta una fuerte eficacia desinfectante frente a los microorganismos definidos por la norma ISO 14729, y además desinfecta de forma eficaz en más del 99% la Acanthamoeba.

De esta forma, se reduce el riesgo de infección ocular.

Limpeza eficaz debido al enzima proteolítico


La lipocalina proteica, considerada como causa de sequedad, se descompone gracias a la inclusión de enzimas proteolíticos.

Así, mejoramos la comodidad de las lentes de contacto.





Uso

- 1.) Coloque las lentes en el estuche, coloque la tableta desinfectante/neutralizante y rellene de "Solución disolvente y para enjuagar" hasta la línea marcada y cierre el estuche.

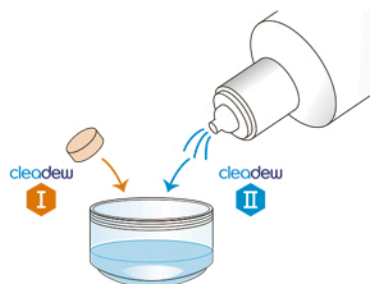

- 2.) Retire las lentes y úselas después de enjuagarlas con "Solución disolvente y para enjuagar".

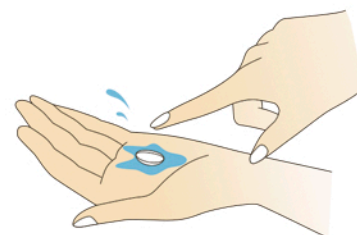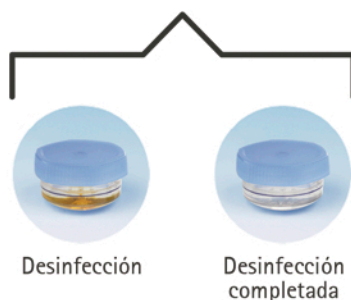

Conoptica

Juntos por una visión mejor